

保守点検・修理 報告書

管理 No. H20150408-1

発行日 平成27年4月9日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号 : 300129
作業年月日	平成 27年 4月 9日		作業時間 : / Hr
顧客名	クリニックいちょう		TEL : 0532-35-7117
所在地	豊橋市草間町字二本松24-1		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 26年 3月 5日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 487
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒	
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

E202x7, E108x1, E210x1, E212x1

装置 情報	交換後運転回数 : 458	更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌 : 152	殺菌+7L : 306
	リークチェック : 0	自己洗浄 : 0	7Lアルコール単独 : 0	エア単独 : 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☐	
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☐	
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年 4月 9日

ご署名 三浦 弘 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町二丁目1-40ゲラカーサ御器所
TEL : 052-859-1333

責任技術者

作業者

H27 4/9

