

保守点検・修理 報告書

管理 No. H 2015 0501

発行日 平成 27 年 5 月 1 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	300141	
作業年月日	平成 27 年 5 月 1 日		作業時間	1	Hr
顧客名	三浦医院 様		TEL	0532-45-2611	
所在地	豊橋市弥生町 中原 70		担当	様	
販売店			担当	様	
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 / 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 465
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

E110x3

装置 情報	交換後運転回数	321	更新（リセット）実施・未実施	殺菌	43	殺菌+アル	278
	リークチェック	0	自己洗浄	1	アルコール単独	0	エア単独

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手（本体側）		☐	
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☐	
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

427 年 5 月 1 日

ご署名

シマ 正明

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町二丁目 1-4 Oゲラサ御器所
TEL : 052-859-1333

責任技術者

作業者

H27. 5/1

