

保守点検・修理 報告書

管理 No.
発行日 平成27年5月20日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				製造番号：100489
作業年月日	平成 27 年	5 月	20 日		作業時間： / Hr
顧客名	岐阜市民病院				TEL：058-265-4141
所在地	岐阜県岐阜市今沢町18番地				担当：ヤスイ 様
販売店	井上精機株式会社				担当：岡田様
納入年月日	平成 24 年	4 月	2 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2 年	2 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐				修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴
定期点検作業依頼

不具合原因、作業内容
定期点検作業 定期交換パーツ交換

点検項目	殺菌槽 LED	正常
フタロック	☒	正常 ☒
酸素ライン	☒	正常 ☒
アルコールライン	☒	正常 ☒
オゾンセンサ	☒	正常 ☒
給水ライン	☒	正常 ☒
濃度計流量	☒	正常 ☒
水位センサ	☒	正常 ☒
水漏れ確認	☒	正常 ☒
清掃	☒	正常 ☒
トレー	☒	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	☒	正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
試運転後特に異常はありませんでした。次回点検は2016年5月頃となります。

装置情報	交換後運転回数：504 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌：680	殺菌+7L：350
	リークチェック：29 自己洗浄：2	7Lコール単独：22	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☐	
オゾン濃度計 Assy		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☐	
オゾンセンサ		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

修理業者	新鋭工業 株式会社 名古屋支店	ご署名	近藤寿美子	年	月	日
責任技術者	愛知県名古屋市中昭和区石仏町二丁目1-40 グランカーサ御器所	責任技術者		作業者		
	TEL: 052-859-1333					2015 5/20