

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

14-00149

No. 150528

配布先	納入先	新鋭工業（株） 名古屋支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	静岡県浜松市浜北区道本 28-3		機番	001560
環営	ユーザー名	桜町クリニック 様		納入日	平成 21 年 12 月 18 日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 27 年 5 月 1 日
計	返送先	納入先と同じ		発送日	平成 27 年 5 月 28 日

修理依頼・不具合内容

- ・インジケータ変色不良（新鋭工業殿が水槽内清掃で復旧しました）
- ・平成 27 年 定期点検

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

定期点検と劣化した部品を交換しました。

写真 1 : No1 定期交換部品



写真 2 : No2~5 交換部品



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. 内部清掃
3. オゾン水濃度測定：0.43~0.50mg/L ・ ・ 正常
4. P S A（酸素発生装置）性能点検 ・ ・ 正常
酸素濃度：92.2% 酸素流量：0.75L/min 圧力：0.102~0.175MPa（AC100V, 50Hz）
5. 運転確認：異常なし。
6. インジケータ変色：異常なし
7. 運転カウンタ：4012

承認

安
15.5.28
田

審査

中
27.5.28
澤

作成

H27.5.28

中澤

交換部品

No.	品名	数量	備考
1	定期交換部品（分解触媒、ドレンフィルタ）	1 式	
2	オゾン水製造ポンプ（P-1）	1 台	
3	水位レベルセンサー（L）	1 本	
4	フタスプリング	4 個	
5	排水バルブ用チューブ	1 本	