

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

14-00217

No. 150811

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 名古屋支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	伊東内科クリニック 様		機番	100121
環営	所在地	愛知県名古屋市千種区山添町1-26		納入日	平成22年9月22日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成27年6月29日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成27年8月1日

修理依頼・不具合内容

・タッチパネルが起動しない

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検および作業内容

工場で運転確認したところ、正常に起動しました。しかし過去の事例から故障の前兆と判断してタッチパネル交換しました。

不具合品を引き続き起動確認していますが、8/11現在で起動不良は再現しない状態です。

写真：タッチパネル



[2] 作業内容

- 1：タッチパネル～コントロール基板の配線チェック・・・正常
- 2：部品交換・・・写真と下表をご参照ください

[3] 性能確認

- 1：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.68ppm・・・正常
- 2：運転確認・・・正常

承認

安
15.8.11
田

審査

中
15.8.11
澤

作成

H27. 8. 11

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	タッチパネル	1台	No. 087374H007465
	アルコールタンクキャップ	1個	

(株) IHI シバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528