

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

14-00559

No. 151026

配布先	納入先	新鋭工業（株） 名古屋支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	三重県松阪市嬉野算所町 515-1		機番	000793
環営	ユーザ名	うれしの太田クリニック 様		納入日	
防品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 27 年 8 月 25 日
計	返送先	納入先と同じ		発送日	平成 27 年 10 月 25 日

修理依頼・不具合内容

- ・インジケータ変色不良
- ・各部点検

不具合原因（故障箇所）と処置


[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

定期点検と劣化した部品を交換しました。

写真 1 : No1~3 定期交換部品



写真 2 : No4~5 交換部品

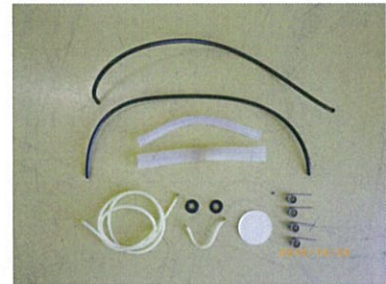

[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. 運転プログラムバージョンアップ・・・Ver. 8⇒Ver. 10
12回運転するとフィルターランプが点滅して清掃時期をお知らせします。
3. オゾン水濃度測定：0.46~0.55mg/L・・・正常
4. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.2% 酸素流量：0.75L/min 圧力：0.089~0.160MPa（AC100V, 50Hz）
5. 運転確認：異常なし。
6. インジケータ変色：異常なし（機械のフタ上に現物を貼り付けました）
7. 運転カウンタ：1338

交換部品

No.	品名	数量	備考
1~3	定期交換部品	1式	
	吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルタ、触媒		
4	配管チューブ、パッキン	1式	
	排水シロコンチューブ、P-1 出口チューブ		
	水槽キャップパッキン、定流量弁パッキン		
	P S A用チューブ		
5	フタスプリング	4個	

承認

安
751026
田

審査

中
751026
澤

作成

H27. 10. 26

中澤