

保守点検・修理 報告書

管理 No. H20151207
発行日 平成27年12月7日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100094
作業年月日	平成27年12月7日		作業時間: 1 Hr
顧客名	伊藤整形・内科・あいち腰痛オペクリニック 様		TEL: 0587-92-3388
所在地	愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字郷東41		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 23年 5月 18日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 2 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E201x1 E202x3, E403x5

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 463
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 2086	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 1068	殺菌+7L: 1294
	リークチェック: 1200	自己洗浄: 804	アルコール単独: 2	エア単独: 47

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手（本体側）		☒	1
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 12 月 7 日

ご署名 小嶋 彩子



修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町二丁目1-40 ケラカサ御器所
TEL: 052-859-1333

責任技術者	作業者
	H27.12/7