

保守点検・修理 報告書

管理 No. H20151126
発行日 平成27年 12月14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号：100591
作業年月日	平成27年 11月26日 (12月14日)		作業時間： 1 Hr
顧客名	宮地内科医院 様		TEL：0586-73-3032
所在地	一宮市桜3-1-11		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成24年 11月 15日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 3 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E100x11, E103x11, E400x4, E104x3, E30/x2, E115x1, E20/x1, E402x1

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	→ 12/4 交換	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒		エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒		オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 695
オゾンセンサ	正常 ☒		排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒		細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒		排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒		オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒		異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒		殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒			正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数： 115	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌： 3/3	殺菌+アル： 0
	リークチェック： 130	自己洗浄： 4	アルコール単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手（本体側）		☐	
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☐	
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2015 年 12月 14 日

ご署名

宮地 幸郎

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町二丁目1-4 Oケラカーサ御器所
TEL：052-859-1333

責任技術者

作業者

H27. 12/26

早坂

12/4 早坂