

保守点検・修理 報告書

管理 No. H20151021
発行日 平成27年10月21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100056
作業年月日	平成27年10月21日		作業時間: 1 Hr
顧客名	ゆうクリニック 様		TEL: 052-761-1155
所在地	名古屋市千種区末盛道5-3		担当 様
販売店	(株) スズケン 名古屋 様		担当 栗村 様
納入年月日	平成22年11月9日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年2回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E202x23, E403x1, E200x1, E300x1

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 1752
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

Ver 0107

装置 情報	交換後運転回数: 230	更新(リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 58	殺菌+アル: 186
	リークチェック: 1	自己洗浄: 2	アルコール単独: 2	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☒	1
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H27年 10月 21日
〒464-0821 名古屋市千種区末盛道5-3 メディカルビル2F
本山 腎泌尿器科

ご署名 ゆうクリニック 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町二丁目1-40 グランサ御器所
TEL: 052-859-1333

責任技術者	作業者
印	印
	27/10/21