

保守点検・修理 報告書

管理 No. H2015 1014

発行日 平成 27 年 10 月 14 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	300003
作業年月日	平成 27 年 10 月 14 日		作業時間	1 Hr
顧客名	光生会病院		TEL	0532-61-3166
所在地	豊橋市吾妻町 137		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 25 年 2 月 15 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 2 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 475
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

結水フィルター交換

E110x20, E207x3, E302x7, E213x23

装置 情報	交換後運転回数	1703	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌	4222	殺菌+7L	2018
	リークチェック	6168	自己洗浄	831	7L単独	222	エア単独

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手（本体側）		☒	1
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 10 月 14 日

ご署名 佐々木 昭彦

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市中区石仏町二丁目 1-4 Oガラス御器所
TEL: 052-859-1333

責任技術者

作業者

H27. 10/14

