

保守点検・修理 報告書

管理 No. H20151225
発行日 平成27年12月25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100120
作業年月日	平成27年12月25日		作業時間: 1 Hr
顧客名	西山団地内科胃腸科		TEL: 052-701-1121
所在地	名古屋市名東区西里町1-36		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成22年9月28日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年3回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E100x42, E103x42, E300x3, E104x28, E403x2, E105x4
E215x2, E300x3, E403x2, E402x16, E302x6, E101x17, E200x4, E202x19, E400x16

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 443
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒ 6ビ割れ有	殺菌チューブ類 (A1) (A2)	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	い (7ビ) 正常 ☒	18x4x15x44

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

Ver.0107

装置 情報	交換後運転回数: 939	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 1905	殺菌+7L: 3308
	リークチェック: 66	自己洗浄: 1250	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☐	
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☐	
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 27.12.24 日

医師 大脇俊宏

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町二丁目1-40 グランサ御器所
TEL: 052-859-1333

責任技術者

作業者

H27.12/25

