

修理報告書 (引取り修理)

修理依頼番号 14-00708 No. 151127

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 名古屋支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	安江内科クリニック 様		機番	100282
環営	所在地	愛知県名古屋市天白区大根町 370		納入日	平成 23 年 7 月 22 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 27 年 11 月 6 日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 27 年 11 月 28 日

修理依頼・不具合内容

停電異常 (E:403)、タッチパネルが反応しない

不具合原因 (故障箇所) と処置

[1] 点検および作業内容

異常が再現することを確認しました。
 コントロール基板の故障が原因で、基板からタッチパネルへ信号が止まった状態でした。
 このためタッチパネルの画面が「IHI OED-1000」から「処理選択」に移行しませんでした。
 コントロール基板を交換して復旧しました。なお、タッチパネルは異常ありませんでした。

写真：コントロール基板



[2] 作業内容

- 1 : 部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2 : オゾン水濃度測定 (規定値 0.7 ± 0.2 ppm) : 0.72ppm・・・正常
- 3 : 運転確認・・・正常
- 4 : 装置情報
 交換後運転回数 : 10 殺菌 : 141、殺菌+アルコール : 762、リークチェック : 2
 自己洗浄 : 77、アルコール単独 : 2、エア単独 : 1

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	コントロール基板	1 枚	
	アルコールタンクキャップ	1 個	

承認	安田
審査	中澤
作成	H27. 11. 30 中澤