

## 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160427H

発行日：平成28年4月27日

|       |                                                                                                                           |                                                            |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                     |                                                            | 製造番号：100660      |
| 作業年月日 | 平成28年4月27日                                                                                                                |                                                            | 作業時間：2 Hr        |
| 顧客名   | 光生会病院 様                                                                                                                   |                                                            | TEL：0532-61-3166 |
| 所在地   | 豊橋市若草町 137                                                                                                                |                                                            | ご担当 様            |
| 販売店   | 三輪器械                                                                                                                      |                                                            | ご担当 様            |
| 納入年月日 | 平成25年2月15日                                                                                                                | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品              |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年3回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                            |                  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                            |                  |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                                                               |              |                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルス数 590    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺フューズ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> (交換)        |
|          | <input type="checkbox"/>                                                      |              | <input type="checkbox"/>                           |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|          |              |                |             |               |
|----------|--------------|----------------|-------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数：1570 | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌/消毒：2079  | 殺菌/消毒+アル：1899 |
|          | リークチェック：3904 | 自己洗浄：880       | アルコール単独：615 | エア単独：0        |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールドチューブ式  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | バリスタ         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

28年4月27日

ご署名 藤口真澄 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店  
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40  
TEL：052-859-1333

|       |                |
|-------|----------------|
| 責任技術者 | 作業者            |
|       | H28.4/27<br>早坂 |