

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160601 H

発行日：平成 28 年 6 月 1 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：300066
作業年月日	平成 28 年 6 月 1 日		作業時間： 1 Hr
顧客名	奥村クリニック 様		TEL：052-745-9511
所在地	名古屋市千種区今池3-16-12		ご担当
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 25 年 10 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 1 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E111×4, E205×3, E214, E401×4
E302×4, E110×7, E201×4, E202×5, E200×10, E101×2, E402×5

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 453
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数：1532 更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：626	殺菌/消毒+7L：906
	リークチェック：990 自己洗浄：1	アルコール単独：3	エア単独：13

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
ポン水濃度計用フィル		☒	1	バルブスタ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	アルコールキャップ		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

28 年 6 月 1 日

ご署名

奥村 文雄典



修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者	作業者
	H28. 6/1