

点検・修理報告書

管理 No. 20190218

発行日: 年 月 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2019 年 2 月 18 日		作業時間: Hr
顧客名	やまなか歯科 様		TEL:
所在地	静岡県浜松市南区高塚町1470-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 4 月 2 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14090192	運転回数: 1988
------	----------------	------------


不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラーは、出ていないが時々ドアのセンターあたりに水が漏れている。

原因

内蓋のパッキン面の調整がずれてしまってパッキンと缶体に隙間ができ加圧されたときにすいてきが外に漏
2~3滴ほどドアの下にたれていたのだと思います

処置、作業内容

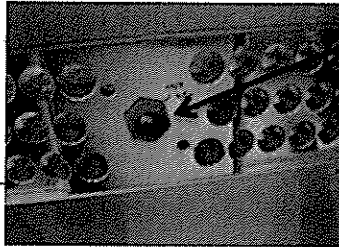

・内蓋調整をして運転確認をして確認しました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒432-8065 静岡県浜松市南区高塚町1470番1

やまなか歯科

TEL 053-415-1155 FAX 053-415-1156

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJサービス 19/02/18 富田	環境PJサービス 19/02/18 安田