

保守点検・修理 報告書

管理 No. 2016/8/12

発行日：平成 28 8 月 12 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300286
作業年月日	平成 28 年 8 月 12 日		作業時間： / Hr
顧客名	佐久間医院 様		TEL： 0584-66-2417
所在地	岐阜県海津市平田町蛇池 9 5		ご担当 榊原院長 様
販売店	アルフレッサ株式会社 大垣営業所		ご担当 華井 様
納入年月日	平成 26 年 8 月 9 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E200 x1

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 326
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.66 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☒		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

1日の終りに、自己洗浄を1回必ず行うこと。

装置 情報	交換後運転回数： 136	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 215	殺菌/消毒+アル： 67
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1	アルコール単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポンプ分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1
ポンプ水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1
ポンプ水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

岐阜県海津市平田町蛇池 9 5

医療法人社団 関南会 佐久間医院 28 年 8 月 12 日

榊原

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者 作業者

サ
藤田

Ver.3.1