

《不具合対応報告書》

担当者: 中村

【発生日】 年 月 日
 【対応日】 2019 年 7 月 1 日
 【連絡元】 ☒モリタ(担当者: 落合) ☐ユーザー ☐その他()
 【ユーザー名&県名】

静岡・静岡歯科医院 様

IC Washer【機番: 】

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)
☐現地対応
 <対応内容> ☐部品交換() ☐その他()

【給水方法】 ☐水
☐水&お湯

【ラック種類】 ☐標準ラック
☐ハンドピース用ラック
 <メクラ栓の使用> ☐有 ☐無
 <SUSフィルターの洗浄> ☐有 ☐無

【備考】

IC Clave【機番: 100166】

【症状】
 ・エラーNo.11 蒸気発生器高温異常 = 6/27 再現あり 精製水不足による
 ・エラーNo.12 ドアセンサー異常 - 7/1 運転前に開閉確認の様子見。

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)
☒現地対応
 <対応内容> ☐部品交換() ☐その他(排水コネクタ調整)

【給水方法】 ☒アイオニー使用
☐精製水購入
☐その他()

【滅菌バッグ】 ☐ディスポ
☒リユース

【網の種類】 ☐トレイ棚
☒網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☒有 ☐無

【設置場所】

【備考】
 ・排水コネクタの(有)を調整済み



BMS-Test STEAM