

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日：平成 29年 3月 9日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100681
作業年月日	平成 29 年 3月 9日		作業時間： / Hr
顧客名	松岡内科クリニック 様		TEL：
所在地	岐阜県大垣市新田町 2-14		ご担当 様
販売店	株式会社アルフレッサ 岐阜支店		ご担当 華井 様
納入年月日	平成 25年 3月 27日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 4 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
E:300 , E:202			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 840
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常はありません。			
※ OED 使用後、自己洗浄をお願い致します。→ 本槽内の掃除			

装置情報	交換後運転回数： 41	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 264	殺菌/消毒+7L： 9
	リークチェック： 0	自己洗浄： 2	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	H29 年 3 月 9 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 新田	印

修理業者	新鋭工業 株式会社 名古屋支店 愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40 TEL：052-859-1333	責任技術者	作業 藤田
------	---	-------	----------