

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160817
発行日 平成 28年 8月 17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100722
作業年月日	平成 28年 8月 12日		作業時間:	Hr
納入予定	きむら内科医院 様		TEL:	
所在地	福井県		担当	様
付属品	トレ、電源コード、給水ホース、排水ホース、ゴムパッド、取説、簡易取説、添付文書			
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒ 次回より記入
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

中古医療機器販売に伴う点検整備

不具合原因、作業内容

保守点検作業とオゾン水系統の配管チューブを交換しました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 620
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした

運転プログラムバージョン Ver0107/T01.A

装置情報	交換後運転回数: 29 → 0 更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌: 254	殺菌+7L: 480
	リークチェック: 6	自己洗浄: 29	アルコール単独: 45
			エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1 個	配管チューブ		☒	1 式
排水栓		☒	1 個	吸盤		☒	3 個
オゾン水濃度計		☒	1 個	タッチパネルバリスタ		☒	1 本
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1 枚	アルコールタフキャップ		☒	1 個
オゾンセンサー		☒	1 個			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

工場点検につき不要です

ご署名

印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者 作業者



Ver 3.0