

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 29 年 2 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300287
作業年月日	平成 29 年 2 月 2 日		作業時間： 7 Hr
顧客名	みのかも西クリニック 様		TEL： 0574-28-5310
所在地	岐阜県美濃加茂西町5-377-1		ご担当 益田院長 様
販売店	中北薬品株式会社 岐阜支店		ご担当 足立 様
納入年月日	平成 26 年 12 月 18 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
E:200×7, E:110×1			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルス数 487
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 7.2 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
・バリスタも付けました。			
・ポンプが空だったので交換いたしました。			

装置 情報	交換後運転回数： 289	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 752	殺菌/消毒+アル： 426
	リークチェック： 376	自己洗浄： 7	アルコール単独： 0	エア単独： 431

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	29 年 2 月 2 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	足田 幸裕 印 

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
 愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
 TEL：052-859-1333

責任技術者	作業者
	益田 