

草川医院

御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: ISM 中村

点検年月日	平成20年 2月 17日	機種名	ONW-10	製造機番	≠00127A
設置場所	三重県津市大里家田町 1205-1	TEL	059-232-210		
設置時期	2007.0507	使用時間	—	御対応者	—

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: — mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☐	濃度: 56% 流量: 0.89 L/min 圧力: 0.164~0.20MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☒ 下部フィルター(フィルター) 交換
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	・I7-2(洗浄槽水位低下)が
吸湿筒	一式	・出るニオイがある。(終了間際)
ドレン用フィルタ	一個	・スコープ: PENTAX...? OLYMPUS?
オゾン分解触媒	一個	・トルコ産糸割れ、形跡。

H29 年 2月 17日

ご署名

中村 ISM