

羽津内科クリニック 御中

# 点検確認書

株式会社 IHIシバウラ  
環境事業部

点検担当者: ISM 三好

|       |                |      |              |      |        |
|-------|----------------|------|--------------|------|--------|
| 点検年月日 | 平成29年 2月 17日   | 機種名  | ONW-10       | 製造機番 | 000148 |
| 設置場所  | 三重県四日市大字西町10-6 | TEL  | 059-331-2626 | 御対応者 | 院長 渡辺  |
| 設置時期  | 2003.6.27      | 使用時間 | —            |      |        |

| 点検項目       | 点検結果 |                                     |                                           |                          |
|------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| スイッチ類      |      |                                     |                                           |                          |
| 電源釦        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                        | <input type="checkbox"/> |
| フィルタリセット釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                        | <input type="checkbox"/> |
| 運転/停止釦     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                        | <input type="checkbox"/> |
| アルコールモード釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                        | <input type="checkbox"/> |
| ランプ類       |      |                                     |                                           |                          |
| 操作パネル      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                        | <input type="checkbox"/> |
| 蛍光灯        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                        | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄動作       |      |                                     |                                           |                          |
| フタロック      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| 給水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| アルコールフラッシュ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| オゾン分解ファン   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| 排水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| 異常音、振動     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| 性能確認       |      |                                     |                                           |                          |
| オゾン水濃度     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: — mg/L                                |                          |
| オゾンインジケータ  | 正常   | <input type="checkbox"/>            |                                           |                          |
| 酸素発生       | 正常   | <input type="checkbox"/>            | 濃度: 58 % 流量: 0.7 L/min 圧力: 0.66-0.288 MPa |                          |
| 水漏れ確認      |      |                                     |                                           |                          |
| 装置外        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| 装置内        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| 清掃         |      |                                     |                                           |                          |
| 外装         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                        | <input type="checkbox"/> |
| 内部         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                        | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄コネクタ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                        | <input type="checkbox"/> |

| 交換部品     | 数量 | コメント                                                                                                                           |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 吸着筒      | 一式 | Xジェネ4日市・飯本<br>・スー70 PENTAX (EG16-k10)<br>検診日7月~1月。機能水の使用可能は稼働<br>から。(四日市)<br>・酸素発生インジケータのためスホ点検<br>を省略します。<br>検診期(7月~1月): 4日/月 |
| 吸湿筒      | 一式 |                                                                                                                                |
| ドレン用フィルタ | 一個 |                                                                                                                                |
| オゾン分解触媒  | 一個 |                                                                                                                                |

080-2447-9829  
Xジェネ 飯本

マナ(スポット)  
三好  
4日市検査

29年2月17日  
署名 中教 36

印