

保守点検・修理 報告書

管理 No. H20150526
発行日 平成 27 年 5 月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100098
作業年月日	平成 27 年 5 月 26 日		作業時間: 1 Hr
顧客名	あおば内科クリニック 様		TEL: 0533-57-0211
所在地	蒲都市形原町計後家 22-1		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 23 年 6 月 14 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 4 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 578
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒ → 送水側パイプ内		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

E202x4, E403x3, E201, E200x2

装置 情報	交換後運転回数: 632 更新(リセット)実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 1248	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 1	自己洗浄: 15	7L単独: 0
			エア単独: 125

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☒	1
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

2015. 5. 26

ご署名 鈴木 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町二丁目 1-4 Oゲラカーサ御器所
TEL: 052-859-1333

責任技術者	作業者
	H27 5/26