

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26 年 7 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100057
作業年月日	平成 26 年 7 月 8 日		作業時間:	1 Hr
顧客名	さかい内装クリエック		TEL:	059-361-5001
所在地	四日市市宮田一色町 30-54		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 11 年 7 月 20 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特にございませんでした

不具合原因、作業内容

特にございませんでした

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸系ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 594
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

設置情報	交換後運転回数: 173	更新 (リット) 実施・未実施	殺菌: 5	殺菌+PL: 498
	リークチェック: 503	自己洗浄: 500	7カラム単独: 0	エア単独: 0-

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

26年 7 月 8 日

ご署名 阪井 貴久 印

修理業者 新鋭工業販売 株式会社

☒ 本社
名古屋市中区徳川2-16-42
TEL: 052-939-0700

☐ 静岡営業所
静岡市葵区千代田6-30-22
TEL: 054-208-3232

責任技術者	作業者
	野田