

修理報告書（引き取り修理）

修理依頼
番号

No. 081015

配布先	納入先	新鋭工業販売株式会社 名古屋本社 殿		機種	ONW-10
客先	所在地			機番	001503
環営	ユーザー名	河村病院 様		納入日	2007年 12月 27日
防品	修理者	中澤一裕	作業時間	受付日	2008年 9月 30日
	返送先	納入先と同じ		発送日	2008年 10月 15日
計	3				

修理依頼・苦情内容

- ・エラー6（酸素発生装置異常）が時々発生する。
- ・装置が停止している間、水が漏れて床が濡れた。
（9月22日出張確認したが機械からは水漏れしなかった）

不具合原因（故障箇所）と処置内容

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

エラー6と水漏れは再現せず、機械に異常箇所は見当たりませんでした。

運転カウンタ：96回

[2] 修理・点検内容

- 給水系統分解点検
- PSA（酸素発生装置）点検・・・正常
交換後 酸素濃度 92.2%
流量 0.78L/min
圧力 0.121~0.215 Mpa
- 運転確認 異常なし
インジケータ異常なし

承認



—以上—

交換部品

審査	部品番号	部品名称	数量	備考
作成				
H20.10.15				
中澤				