

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

14-01303

No. 160719

配布先	納入先	新鋭工業（株）名古屋支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	愛知県一宮市木曾川町黒田十一ノ通り 77-1		機番	001189
環営	ユーザー名	ともだクリニック 様		納入日	平成 18 年 11 月 14 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 28 年 6 月 9 日
計	返送先	納入先と同じ		発送日	平成 28 年 7 月 15 日

修理依頼・異常内容

インジケータ変色不良

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

オゾン発生装置の上流に酸素発生装置（PSA）がありますが、酸素濃度 規定値90%に対し 71%と下がっておりまして。これが原因でオゾンインジケータの変色が「要点検」になりました。酸素発生装置（PSA）を構成する部品を交換して復旧いたしました。

No1～3：定期交換部品

No4～7：チューブ、水位センサー、ポンプ



〔2〕修理・点検内容

- 部品交換・・・下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.43～0.52 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検
酸素濃度：93.4% 酸素流量：0.79L/min 圧力：0.092～0.171MPa
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
- 運転カウンタ：1850

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1～3	定期交換部品（PSA 部品）	1 式	SPS-12016
	吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルタ、分解触媒		
4	配管チューブ、パッキン	1 式	
5	水位レベルセンサー	3 本	
6～7	水ポンプ（P-1、P-2）	2 台	

承認



審査



作成

H28. 7. 19

中澤