

点検・修理報告書

管理 No. 19310
発行日: 2020年4月7日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2020年4月6日 作業時間: 8 Hr
顧客名	まつうらデンタルクリニック 様
所在地	静岡県三島市大社町1-24
販売店	株式会社モリタ 静岡営業所
納入年月日	2018 年 4 月 24 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100324	運転回数: 1392回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー11蒸気発生器高温異常が発生した。		
原因		
・水道水を使用したために、蒸気ヒータに水道水に含まれるシリカ、カルシウムなどが付着し、ヒーターの温度が異常上昇したと考えられます。		
処置、作業内容		
・蒸気ヒータのほかにもシリカ、カルシウムが付着している部品が多数あり、新品交換いたしました。 (蒸気ヒーター、蒸気発生器、温度センサー、蒸気弁、回水弁、真空弁)		
特記事項		
・必ず精製水をご使用ください。水道水を使用されると、故障の原因となります。		



蒸気ヒーター



蒸気発生器

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気ヒーター		1		
2	蒸気発生器		1		
3	温度センサー		1		
4	2方電磁弁		1		
5	3方電磁弁		2		
6					
7					

1. 有償 2. ☒ 無償

部品代 合計

技 術 料

出 張 料

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

まつうらデンタルクリニック
院長 年松 浦月 孝 之
〒411-0853 静岡県三島市大社町1番24号
TEL 055-983-3871
FAX 055-983-3872 印
ご署名

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池 '20/04/07	富田 '20/04/07	三宅 '20/04/07