

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170905
発行日：平成 29年 9月 5 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300401
作業年月日	平成 29 年 9 月 5 日		作業時間： Hr
顧客名	山本医院 様		TEL： 0557-47-5566
所在地	静岡県伊東市宇佐美1981番地12		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 26 年 9 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
H29年 定期保守点検	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 残 10MPa	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 854
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒ E付
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	☐
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
異常ありませんでした	

装置 情報	交換後運転回数： 662 → 0 更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 2	殺菌/消毒+アル： 970
	リークチェック： 0	自己洗浄： SSS	アルコール単独： 0
		エア単独： 0	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	29.9.-5	〒414-0001 伊東市宇佐美1981-12
	山 本 年 医 院 院長 山本佳洋 TEL 0557-47-5566 FAX 0557-47-5573	
修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528	責任技術者 中澤	作業者 H29.9.5 中澤