

点検・修理報告書

管理 No. 20002

発行日: 2020年 7月 7日

IC Washer			
作業年月日	2020 年 6 月 23 日		作業時間: 8 Hr
顧客名	デンタルクリニック岡田 様		TEL:
所在地	静岡県磐田市富士見台10-4		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 静岡営業所		ご担当 様
納入年月日	2018 年 9 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100306	運転回数: 998回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・タッチパネルが暗くなる。		
・施設側ブレーカが落ちる。		
原因		
・ゴムホースから水が漏えいし、漏電したためと考えられます。		
処置、作業内容		
・ゴムホースを新品交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ゴムホース (ゴムC)		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 7 月 10 日

ご署名

岡田

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	佐藤
20.07.07	20.07.07	20.07.07