

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 30 年 1 月 16 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 300142
作業年月日	平成 30 年 1 月 16 日	作業時間： 1 Hr
顧客名	しみず消化器クリニック 様	TEL： 0584-89-7107
所在地	大垣市割田2-131-1	ご担当 様
販売店	(株)フォーム岐阜支店	ご担当 服部 様
納入年月日	平成 25 年 12 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 3 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

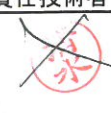
不具合状況、依頼内容、異常履歴	
8/25, E=200x2, 9/2, E=201x1	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 379
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
1日の終りに、自己洗浄の実施を依頼致します。	

装置 情報	交換後運転回数： 382	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 129	殺菌/消毒+7L： 1144
	リークチェック： 0	自己洗浄： 12	7L単独： 1	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	30 年 1 月 16 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	院長 清水 潤
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者	作業者
	藤田