

保守点検・修理 報告書

管理 No. 2017 11 21

発行日：平成 29 年 11 月 21 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300495
作業年月日	平成 29 年 11 月 21 日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	岡田胃腸科クリニック 様		TEL：0564-54-0125
所在地	愛知県岡崎市若松東2-9-5		ご担当
販売店	アルフレッサ株式会社 岡崎支店		ご担当 伴 様
納入年月日	平成 27 年 8 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
E200×11、E202×10、E101×1			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 390
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ (交換)
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数：889	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：14	殺菌/消毒+7L：2061
	リークチェック：0	自己洗浄：215	アルコール単独：0	エア単独：4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールドチューブ一式		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	平成 29 年 11 月 21 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	伴 美紀子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者	作業者
	伴 美紀子