

保守点検・修理 報告書

管理 No. H/20180420

発行日：平成 30 年 4 月 20 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100426
作業年月日	平成 30 年 4 月 20 日		作業時間： 1.2 Hr
顧客名	三神医院 様		TEL： 054-237-5653
所在地	静岡県静岡市駿河区西大谷4-4		ご担当 様
販売店	株式会社スズケン 静岡支店 様		ご担当 様
納入年月日	平成 24 年 5 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6 年 6 回目 定期点検シール記入 ☒		
(出張)・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
E-200 x 2 (酸素EPA) , E-202 x 4 (殺菌時給水)			
E-205 x 1 (オーバーフロー)			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 580
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置情報	交換後運転回数： 156	更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： 20	殺菌/消毒+7L： 1166
	リークチェック： 0	自己洗浄： 127	7Lアルコール単独： 2	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H30 年 4 月 20 日
静岡市駿河区西大谷4-4
三神医院

ご署名 TEL 054-237-5653

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者	作業者
	2018/4/20 