

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180207

発行日：平成 30 年 2 月 7 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100686
作業年月日	平成 30 年 2 月 7 日		作業時間：2 Hr
顧客名	山田外科 内科 様		TEL：0587-96-6000
所在地	A羽郡大口町4丁目 2-38		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 25 年 3 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒		
(出張・引取)	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E108×4 E200×8 E101×4 E202×7 E214×8 E201×1
E402×1

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 438
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒ 破損	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ (交換)
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

西発素ポンパの残りが少なくなっています。

装置情報	交換後運転回数：2429	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：661	殺菌/消毒+7L：3025
	リークチェック：76	自己洗浄：484	7L単独：9	エア単独：2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールドチューブ一式		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

30 年 2 月 7 日

ご署名 経緯さゆり 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者 作業者



2/7 杉浦