

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180607

発行日：平成 30 年 6 月 7 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100805
作業年月日	平成 30 年 6 月 7 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	とよだ青葉クリニック 様	TEL： 0538-35-5000
所在地	静岡県磐田立野508-2	ご担当 様
販売店	株式会社スズケン 浜松支店 様	ご担当 様
納入年月日	平成 28 年 8 月 2 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 4 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E205X3 E203X1

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 518
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数： 827	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 400	殺菌/消毒+アル： 2999
	リークチェック： 0	自己洗浄： 461	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☒	3
排水栓		☒		接続コネクタ；水槽側		☒	
オゾン水濃度計		☒		接続コネクタ；チューブ側		☒	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

30 年 6 月 7 日

ご署名

金本 誠

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者	作業者
2018/6/7 田村	2018/6/7 柳浦