

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 30年 3月 29日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：	301115	
作業年月日	平成 30年 3月 29日		作業時間：	1 Hr	
顧客名	本町クリニック 様		TEL：	0578-82-1177	
所在地	岐阜県岐阜県飛騨市神岡町船津915		ご担当	様	
販売店	平川医療器商会(株)		ご担当	柚原 様	
納入年月日	平成 29年 3月 30日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 1 回目		定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
なし			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 482
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
7年目、保守点検実施。			

装置 情報	交換後運転回数：	451	更新（リセット）	実施・未実施	殺菌/消毒：	451	殺菌/消毒+7L：	0
	リークチェック：	0	自己洗浄：	218	アルコール単独：	0	エア単独：	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		飛騨市神岡町船津915
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		本町クリニック
ご署名		印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者	作者者
	