

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

14-04101

No. 180508

配布先	納入先	新鋭工業（株） 名古屋支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	静岡県浜松市浜北区道本 28-3		機番	001560
環営	ユーザー名	桜町クリニック 様		納入日	平成 21 年 12 月 18 日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 30 年 3 月 02 日
計	返送先	納入先と同じ		発送日	平成 30 年 5 月 02 日

修理依頼・不具合内容

各部清掃

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

内部清掃と劣化した部品を交換しました。

写真：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. 内部清掃
3. オゾン水濃度測定：0.45～0.56mg/L・・・正常
4. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.8% 酸素流量：0.73L/min 圧力：0.116～0.208MPa（AC100V, 60Hz）
5. 運転確認：異常なし。
6. インジケータ変色：異常なし
7. 運転カウンタ：6696

交換部品

No.	品名	数量	備考
1	配管チューブ、パッキン	1 式	
	・水槽側ホース		
	・排水シリコンチューブ		
	・P-3 入口チューブ		
	・水槽タンクキャップパッキン		
2	水位レベルセンサ（H,HH）	2 本	今回無償

承認

若
18.5.8
井

審査

中
18.5.08
澤

作成

H30.5.8
中澤