

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 180508

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 名古屋支店 殿		機種	OED-1000S
客先	顧客名	光生会病院 様		機番	300003
環営	所在地	愛知県豊橋市吾妻町137番地		納入日	平成25年02月15日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成30年04月12日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成30年05月07日
計	3				

修理依頼・不具合内容

水槽に亀裂

3/28 新鋭工業殿が現場で応急処置を実施

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果

水槽下部に亀裂が発生し、そこから水が漏れていました。

ご使用回数、経年劣化、外力が複合的に作用して亀裂が生じたと推察いたします。

この水槽を交換して復旧しました。

タッチパネルをカラー型に交換しました。操作方法に変更はありません。

写真：交換部品一式



[2] 作業内容

1：部品交換、清掃

2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.67 ppm・・・正常


3：運転確認・・・正常

4：出荷時の運転情報・・・交換後運転回数：726 殺菌：7918 殺菌＋アルコール：3930
リークチェック：11737 自己洗浄：1601 アル単独：555 エア単独：1

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	消毒水槽	1台	
2	タッチパネル	1台	

承認

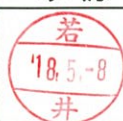

審査



作成

H30.5.8

中澤

（株）IHIアグリテック（旧社名：IHIシパウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528