

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 31年 1月 30日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300657
作業年月日	平成 31年 1月 30日	作業時間： / Hr
顧客名	浅井外科・消化器科医院 様	TEL： 053-436-2108
所在地	静岡県浜松市北区初生町715-1	ご担当 様
販売店	協和医科器械株式会社 浜松支店	ご担当 内藤 様
納入年月日	平成 28年 1月 26日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E:111 X 4, E:200

不具合原因、作業内容

h31年度、保守点検も実施し、各部点検を行いました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒ 496
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 291
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒ 0.71
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 476 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

各部点検し、特に問題ありません。

オゾン水の残量が少ないです。

装置情報	交換後運転回数： 198 更新(リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒： 105	殺菌/消毒+7L： 549
	リークチェック： 641 自己洗浄： 553	7L単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

浜松市北区初生町715番地の1

浅井外科・消化器科医院

ご署名

浅井 陽 介

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者	作業者
	世田