

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 30 年 9 月 27 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：300947
作業年月日	平成 30 年 9 月 27 日	作業時間：1.0 Hr
顧客名	川上内科整形外科 様	TEL：052-502-1606
所在地	愛知県名古屋市西区南川町30	ご担当
販売店	株式会社スズケン 中村支店	ご担当 松本 様
納入年月日	平成 28 年 9 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 ☒ 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E:200 酸素レカ異常2.

不具合原因、作業内容

H30年度 定期メンテナンス実施.

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 287	エアライン	正常 ☒ 34~35 kPa
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 532
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7/ ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

動作点検後、特に問題なし.

装置 情報	交換後運転回数：113	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：20	殺菌/消毒+アル：240
	リークチェック：5	自己洗浄：232	アルコール単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H30 年 9 月 27 日

ご署名

曾根 奈緒美



修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者	作業者
	H30. 9/27 福田