

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 30 年 12 月 4 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100120
作業年月日	平成 30 年 12 月 4 日		作業時間： / Hr
顧客名	西山団地内科胃腸科 様		TEL：052-701-1121
所在地	愛知県名古屋市名東区西里町1-36		ご担当
販売店	株式会社メディセオ 名古屋ALC		ご担当 亀井 様
納入年月日	平成 22 年 9 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 6 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

① 電源が入らなくなった

② 保守メンテナンス

不具合原因、作業内容

① タッチパネル劣化による故障 → タッチパネル交換

② 保守メンテナンス実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 320
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：1716	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒：2835	殺菌/消毒+AL：4555
	リークチェック：66	自己洗浄：1714	アルコール単独：0	エア単独：2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	アルコールキャップ		☒	1
				タッチパネル		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2018年 12月 4日

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者

作業者

早坂

H30 12/4

早坂