

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 31 年 4 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 30115
作業年月日	平成 31 年 4 月 9 日		作業時間： 1 Hr
顧客名	本町クリニック		TEL： 0578-82-1177
所在地	岐阜県飛騨市神岡町船津 9 1 5		ご担当 様
販売店	平川医療器株式会社		ご担当 柚原 様
納入年月日	平成 29 年 3 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック 正常 ☒
 酸素ライン 正常 ☒
 アルコールライン 正常 ☒
 オゾンセンサ 正常 ☒
 給水ライン 正常 ☒
 濃度計流量 正常 ☒
 水位センサー 正常 ☒
 水漏れ確認 正常 ☒
 清掃 正常 ☒ 清掃 ☒
 トレー 正常 ☒
 殺菌槽コネクタ 正常 ☒

殺菌槽 LED 正常 ☒
 エアライン 正常 ☒
 オゾン水濃度計動作 正常 ☒
 排水栓、排水ライン 正常 ☒
 細管送水ライン 正常 ☒
 排気ライン 正常 ☒
 オゾン濃度 正常 ☒
 異常音、振動 正常 ☒
 電源コード 正常 ☒
 殺菌チューブ類 正常 ☒
 マニホールド周辺チューブ 正常 ☒

バルス数 573

履歴 0.7 / ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数： 392	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 843	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 439	7Lアルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

31 年 4 月 9 日
 代表者 島村 全 本町クリニック

ご署名 理事長 清水 裕 英

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
 愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
 TEL：052-859-1333

責任技術者	作業者
	杉浦