

保守点検・修理 報告書

管理 No. 2018/225

発行日：平成30年12月25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号：100591
作業年月日	平成 30 年 12 月 25 日	作業時間：1.5 Hr
顧客名	宮地内科医院 様	TEL：0586-73-3032
所在地	愛知県一宮市桜3-1-11	ご担当
販売店	アルフレッサ株式会社 一宮第一支店	ご担当 棚橋 様
納入年月日	平成 24 年 11 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 5 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

電源不良、定期メンテナンス依頼。

不具合原因、作業内容

タッチパネル不良の為、交換実施。 12月25日 定期メンテナンス実施
¥50,000- ¥70,000-

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 481
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

動作点検後、特に問題なし

装置情報	交換後運転回数： 0	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 412	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： 181	自己洗浄： 4	アルコール単独： 2	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	2.7Lのオゾン水	43-1	☒	1
オゾンセンサー		☒	1	2.7Lのオゾン水		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2018 年 12 月 25 日

宮地内科



修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市中区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者

作業者

H20.12.25

福田

Ver.3.1