

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：2019年

6月

27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100805
作業年月日	2019年 6月 27日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	とよだ青葉クリニック 様		TEL： 0538-35-5000
所在地	静岡県磐田市立野508-2		ご担当 様
販売店	株式会社スズケン 浜松支店		ご担当 近藤 様
納入年月日	平成 25年 8月 2日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 5 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
E: 214x2, E: 205x2, E: 401x1			
不具合原因、作業内容			
19年度、保守点検を実施いたしました。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 517
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
※トレイフラップ有			
各部点検を行い特に問題ありません			

装置 情報	交換後運転回数： 703	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 406	殺菌/消毒+7L： 3897
	リークチェック： 1	自己洗浄： 700	7L単独： 1	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	2019年 6月 27日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	米田 あい 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者	作業者
	近藤 田