

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019年 4月 15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号: 300496
作業年月日	2019年 4月 15日	作業時間: 2 Hr
顧客名	廣瀬医院 様	TEL: 0548-52-0006
所在地	静岡県牧之原市相良174-1	ご担当 様
販売店	株式会社アクセス	ご担当 様
納入年月日	2015年 10月 22日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E-204 (レベルセンサー異常) x5

不具合原因、作業内容

・保守点検を実施いたしました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 375
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

各部点検を行い特に問題ありません。

装置情報	交換後運転回数: 282 更新(リセット)実施・未実施	殺菌/消毒: 282	殺菌/消毒+7L:
	リークチェック: 205 自己洗浄: 3	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	3
排水栓		☒	/	接続コネクタ: 水槽側		☒	(
ポン水濃度計		☒	/	接続コネクタ: チューブ側		☒	/
ポン水濃度計用フィル		☒	/	コントロールパネル		☒	(
オゾンセンサー		☒	/	レベルセンサー		☒	/

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 4月 15日

ご署名 土井 浩江 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL: 052-859-1333

責任技術者 作業者

土井 浩江