

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成31年4月24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号：100687
作業年月日	平成31年4月24日	作業時間：160 Hr
顧客名	栗田クリニック 様	TEL：0565-31-1860
所在地	愛知県豊田市広久手2-1-1	ご担当 様
販売店	日本光電中部株式会社 岡崎営業所	ご担当 宮川 様
納入年月日	平成25年3月1日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6年6回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H31年度定期メンテナンス実施

点検項目

フタロック	正常	☒
酸素ライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒
水位センサー	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒
清掃	正常	☒
トレイ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒

清掃 ☐

殺菌槽 LED	正常	☒
エアライン	正常	☒
オゾン水濃度計動作	正常	☒
排水栓、排水ライン	正常	☒
細管送水ライン	正常	☒
排気ライン	正常	☒
オゾン濃度	正常	☒
異常音、振動	正常	☒
電源コード	正常	☒
殺菌チューブ類	正常	☒
マニホールド周辺チューブ	正常	☒

バルブ数 680

履歴 0.70 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

動作点検後、特に問題なし

装置情報	交換後運転回数：81	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：14	殺菌/消毒+7L：321
	リークチェック：178	自己洗浄：166	7Lアルコール単独：0	エア単独：1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

栗田

修理業者

新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市中昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者

作業者

H31 4/24
宮川

Ver.3.1