

保守点検・修理 報告書

管理 No.

3/

発行日：H 31 年 4 月 12 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100742
作業年月日	H 31 年 4 月 12 日		作業時間：1.0 Hr
顧客名	とどろき クリニック 様		TEL：052-621-0807
所在地	名古屋市緑区海部町字向田 1-6-1		ご担当 様
販売店	(株) X 株式会社 名古屋南支店		ご担当 様
納入年月日	H 25 年 4 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H 31 年度 定期メンテナンス実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 287
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☐ (取付済み)	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

動作点検後、特に問題なし

装置 情報	交換後運転回数：160	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：119	殺菌/消毒+7L：803
	リークチェック：925	自己洗浄：591	アルコール単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H 31 年 4 月 12 日

ご署名

新鋭工業 株式会社

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 名古屋支店

愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40

TEL：052-859-1333

責任技術者

作業者

H 31 年 4 月 12 日
福田

Ver.3.1