

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：2019年 6月 4日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300792
作業年月日	2019年 6月 4日		作業時間： / Hr
顧客名	中岡クリニック 様		TEL： 053-433-2001
所在地	静岡県浜松市東区積志町995		ご担当 様
販売店	株式会社メディセオ 浜松支店		ご担当 山田 様
納入年月日	2016年 5月 30日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
E: 300X1, E: 205X1			
不具合原因、作業内容			
19年度、保守点検を実施いたしました。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 411
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
各部点検を行い、特に問題ありません。			

装置 情報	交換後運転回数： 528	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 324	殺菌/消毒+アル： 1189
	リークチェック： 0	自己洗浄： 547	アルコール単独： 1	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	〒431-3114 静岡県浜松市東区積志町995
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	中岡クリニック
	ご署名 院長 中岡 誠 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

胃腸・大腸内視鏡技術者外科 内作業者
TEL 053-433-2001 FAX 053-433-2000