

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 / 年 / 月 / 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 301141
作業年月日	令和 / 年 / 月 / 日		作業時間： / . 0 Hr
顧客名	おわり瀬戸ひびの内科クリニック 様		TEL： 0561-82-0222
所在地	愛知県瀬戸市西本町2丁目8		ご担当 様
販売店	株式会社サンメディック		ご担当 吉村 様
納入年月日	平成 29年 8月 29日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
R1年度 定期メンテナンス実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 605
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒ ビビ有	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
動作点検後、特に問題はなし			

装置情報	交換後運転回数： 1594	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 1349	殺菌/消毒+7L： 1412
	リークチェック： 2378	自己洗浄： 429	7Lコル単独： 59	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	3
排水栓		☒	/	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	/	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/	アルコールスプレー		☒	1
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 飯嶋 永子

責任技術者 印

作業者 R.1 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者	作業者
	R.1 印