

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 7 月 23 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300141
作業年月日	2019 年 7 月 23 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	三浦医院 様		TEL: 0532-45-2611
所在地	愛知県豊橋市弥生町中原70		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

酸素圧カスィチ異常 (E=113) 99発.

不具合原因、作業内容

酸素圧カスィチは正常.
感知する基盤の不良のため、コントロール基盤の交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 167
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

毎年定期メンテナンス実施済み
交換後、動作確認し特に問題ありません
今日限り無償対応

装置 情報	交換後運転回数: 12	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: —	殺菌/消毒+7L: —
	リークチェック: —	自己洗浄: —	アルコール単独: —	エア単独: —

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ: 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ: チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		コントロール基盤	Vore207	☒	1
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

三浦 三郎

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL: 052-859-1333

責任技術者 作業者

福田	福田
----	----