

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 12 月 11 日

|       |                                                                                                                               |                                                                       |       |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus                                                                                                   |                                                                       | 製造番号: | 500030       |
| 作業年月日 | 2019 年 12 月 11 日                                                                                                              |                                                                       | 作業時間: | 1.0 Hr       |
| 顧客名   | 金城クリニック 様                                                                                                                     |                                                                       | TEL:  | 052-918-7580 |
| 所在地   | 愛知県名古屋市北区金城3-4-5                                                                                                              |                                                                       | ご担当   | 様            |
| 販売店   | (株)メディセオ 名古屋ALC                                                                                                               |                                                                       | ご担当   | 魚住 様         |
| 納入年月日 | 2018 年 12 月 4 日                                                                                                               | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品   |              |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> / 年 / 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |       |              |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>        |                                                                       |       |              |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期メンテナンス実施 (初年度サービス分)  
給水フィルター設置 78,000-

点検項目

|          |                                                                    |              |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 水槽 LED       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 1120   |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.73 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 消毒 チューブ類     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水槽側コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          | <input type="checkbox"/>                                           | 運転プログラムバージョン | 正常 <input type="checkbox"/> Ver.0302 / T11A        |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

動作点検後、特に問題なし

|          |                   |                                                      |                    |                |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 73       | 更新 (リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 消毒 (総運転回数): 3      | 消毒 (洗剤洗浄あり): 1 |
|          | 消毒+アル (総運転回数): 70 |                                                      | 消毒+アル (洗剤洗浄あり): 70 |                |
|          | リークチェック: 0        | 自己洗浄: 70                                             | アルコール単独: 0         | エア単独: 0        |

| 交換部品名称  | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称  | 交換                                  | 数量 |
|---------|-------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------|----|---------|-------------------------------------|----|
| オゾン水濃度計 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | オゾン分解触媒       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤      | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 交換後 No. |                                     |    | 排水栓           | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | エアフィルター | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ: チューブ側 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 水フィルター  | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
|         | <input type="checkbox"/>            |    | オゾン水濃度計用フィルタ  | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 給水フィルター | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
|         |                                     |    |               | <input type="checkbox"/>            |    |         |                                     |    |

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 12 月 11 日

ご署名 山田 〇〇 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 名古屋支店  
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40  
TEL: 052-859-1333

責任技術者

作業者

R1 12/11  
福岡

Ver.1.0